



KRYOKIRURGI

Nu tillgänglig för alla

Att på ett kontrollerat sätt destruera vävnad genom frysning är en idag vanligt förekommande kryokirurgisk behandlingsmetod.

Fördelarna med kyla har under årtusenden varit väl känt och användes redan av de gamla egyptierna. Hippokrates var på sin tid väl förtrogen med kylans smärtlindrande och antiinflammatoriska egenskaper.



Tekniken föll dock i glömska intills dess en engelsk läkare, James Arnott (1797-1883), under första halvan av artonhundratalet publicerade en teknik för att åstadkomma smärtlindning hos tumörpatienter genom att frysa tumören med en blandning av is och natriumklorid. Tyvärr var dåtidens teknik inte utvecklad för att kunna användas för små godartade hudförändringar.

Sedans dess har tekniken stegvis utvecklats från kolsyreis till att omfatta andra köldmedier vilka ger temperaturer ner till -196°C . Enkla lätta hjälpmedel har gjort att metoden numera rutinmässigt kan användas av vårdcentraler, privatläkare, fotvårdsspecialister och andra inom hälsovården.

Vi introducerade 1992 Histofreezer (-55°C) på den svenska marknaden och utökade år 2001 sortimentet med CryoAlfa (-89°C) för att svara upp mot användarnas önskemål att även kunna behandla tillstånd där lägre temperaturer erfordras.

Kryokirurgin används idag över hela världen och antalet behandlingar och applikationsområden ökar ständigt.

Med vänlig hälsning
SKAFTE MedLab AB

Stefan Skafte, vd

Histofreezer -55°C

Marknadens smidigaste utrustning för behandling av godartade hudförändringar. Metoden är väl accepterad av både barn och vuxna.



Histofreezer®

CryoAlfa -89°C

Vill man inte arbeta med flytande kväve är detta marknadens effektivaste frysteknik, s.k vätskefrysning. Lämpar sig för de flesta typer av hudförändringar.



CRYOALFA

Fryspistol LL50x -60°C

För dig som utför många frysningar. Initialt är fryspistol en större investering men betalar sig snart. Fryspistol är det bästa alternativet för dig som arbetar med gynekologi, dental- eller ögonkirurgi.



WALACH

UltraFreeze -189°C

För den professionelle. Frysteknik lämplig för både godartade och icke godartade hudförändringar.

Rekommenderas ej till fotvårdsspecialister eller skönhetsalonger då utrustningen arbetar vid en mycket låg temperatur.



WALACH

Histofreezer®

Kryokirurgi med fingerspetskänsla

Histofreezer har funnits i Sverige sedan 1992 och är marknadens populäraste produkt för frysning av vårtor och hudförändringar. På vårdcentraler och läkarmottagningar har vi många kunder som under lång tid använt Histofreezer.



Histofreezer, en produkt som kombinerar effektiviteten hos traditionell kryokirurgi med en modern aerosolteknik. Resultatet är en bekväm och enkel behandlingsmetod som spar tid och ger pengar. En miljövänlig gasblandning kyler ner behandlingspinnen till -55°C. Pinnen appliceras därefter på hudförändringen under 20-40 sekunder. Idag finns kliniska studier för hela 9 indikationer. Hör gärna av dig för ytterligare information.

Best.nr	Benämning	Pris/tp
1001-0169	Histofreezer MEDIUM, 50 st x 5 mm pinne	1.190:-
1001-0170	Histofreezer SMALL, 60 st x 2 mm pinne	1.340:-
1001-0171	Histofreezer MIX, 60 st (2 mm + 5 mm) pinne	1.340:-

Alla priser exkl. moms och frakt.

Fördelar med Histofreezer

Praktisk

- Enkel att använda
- Ingen sterilisering nödvändig
- Behandlingspinnar - engångs
- Liten och kompakt
- 3 års hållbarhet

Patientvänlig

- Mindre trauma
- Mindre ärrbildning, depigmentering
- Ingen narkos
- Mindre skada på frisk vävnad
- Luktfri

Ekonomisk

- Låg kostnad per behandling
- Inget svinn genom avdunstning
- Snabb behandling (20-40 sek)
- Ingen underhållskostnad
- Ingen kapitalinvestering

Över en miljon
behandlingar utförs
varje år med
Histofreezer

Kampanjerbjudande !


2 st Histofreezer få 15% rabatt

3 st Histofreezer få 20% rabatt


Detta erbjudandet är tidsbegränsat och när du beställer måste du ange kampanjkoden som du finner i medföljande brev.

Enkel procedur


4 steg

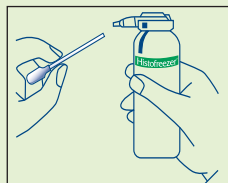


Steg 1
Montera behandlingspinnen i flaskans munstycke.

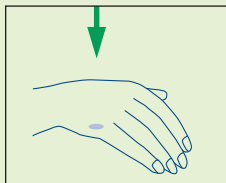

Steg 2
Håll hudförändringen som skall behandlas uppåt.

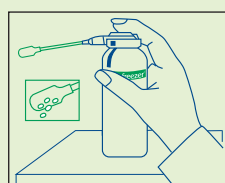

Steg 3
Fyll behandlingsspinnen tills du ser första droppen Vänd så att pinnen pekar mot golvet, vänta i 15 sek.

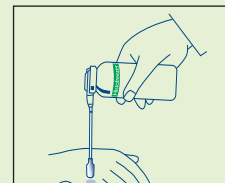

Steg 4
Applicera behandlingsspinnen mot hudförändringen, pressa lätt. VIKTIGT håll behandlingsspinnen rakt nedåt.

Effektiv behandling av vårtor och hudförändringar

Nedan följer en sammanfattning över de vanligaste indikationerna som behandlas med Histofreezer:

Vanliga & Flata vårtor (*Verucca Vulgaris & Verucca Plana*)

Vanliga vårtor kan uppträda var som helst på huden men är vanligast i ansikte, på händer och knän. De har en skrovlig yta och storleken kan variera från en millimeter till över en centimeter. Flata vårtor kan uppträda i större antal på ansikte och baksidan på handen. Storleken kan variera från 1 till 5 mm.



Fotvårtor (*Verucca Plantaris*)

Fotvårtor uppträder vanligtvis på undersidan av foten. De kan också uppträda som s.k. mosaikvårtor, vilka bör behandlas i sektioner.



Sol- & Seborroisk keratos (*Actinic & Seborreic keratosis*)

Solkeratosförändringar uppträder på hud vilken utsatts för sol, speciellt på ljusa personer. Dessa förändringar kan utvecklas till seborroisk keratos, en vanligt förekommande godartad icke viral hudförändring som ofta debuterar i 50-årsåldern.



Mollusker (*Molluscum Contagiosum*)

Mollusker är en vanlig virusinfektion "poxvirus" som är vanligast hos barn i dagisåldern. De ser ut som små pärl-liknande knoppar, nästan som vårtor, och kan dyka upp lite varstans på kroppen. Speciellt drabbade brukar de barn vara som lider av Atopiskt eksem (böjveckseksem). En mollusk kan dyka upp ensam eller i grupp.



Kondylom (*Condyloma Acuminata*)

Kondylom är en sexuellt överförd infektion och kan se ut på olika sätt. De vanligaste är flikiga eller rundade och lätt upphöjda vårtor. De är ofta hudfärgade eller rosa, men kan även vara vitaktiga, röda eller pigmenterade. De förekommer både hos män och kvinnor, men kan också återfinnas hos barn som smittats vid födseln.



Åldersfläckar (*Lentigo*)

Åldersfläckar är bruna fläckar som uppstår på hud som ständigt exponeras för ljus. Lentigo utvecklas från 30 års-åldern och uppåt. Fläckarna uppträder på handens baksida, underarmens översida och i ansiktet.




Hudflikar (*Acrochordon*)

Hudflikar är avlånga, smala trådfina vårtor oftast lokaliserade till armhåla, ljumske och ögonlock.



Kliniskt bevisad effektivitet

Histofreezer[®] har funnits på marknaden i över 14 år. Diagrammet visar en sammanfattning av produktens effektivitet, baserat på ett stort antal kliniska studier.

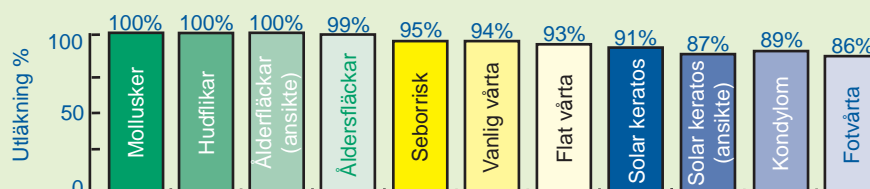

CRYOALFA








Revolutionerande teknik

Lustgas i vätskefas ger marknadens effektivaste frysteknik

CryoAlfa, ett nytt smidigt och effektivt hjälpmedel för kryobehandling av vårtor och andra hudförändringar. Produkten finns idag i tre olika modeller; DERM S, DERM SK och LUX. Några av indikationerna för denna teknik är; fotvårtor, vanliga vårtor, hudflikar, kondylom, mollusker, seborrisk keratos, lentigo, aktinisk keratos, m.m.

Med Cryoalfa kan du enkelt, precist och ekonomiskt dosera kylmediet på hudförändringen. När gasen är slut laddar man om sin CryoAlfa med ny gaspatron. Samtliga modeller finns i två effektutföranden (medium, hög). De olika effektutförandena innebär att kryomediet doseras med olika hastighet/volym.

Fördelar med CryoAlfa

-  Hög kyleffekt genom användning av N²O-gas.
-  Optimal temperatur -89°C för bästa behandlingsresultat
-  Mycket korta frystider
-  Låg kostnad per behandling
-  Litet format
-  Miljövänlig gas
-  Nöjda patienter

Kampanjerbjudande !

Beställ en CryoAlfa DERM S
till specialpris

1.385:-

Detta erbjudandet är tidsbegränsat, när du beställer måste du ange kampanjkoden som du finner i medföljande brev.

Bästa alternativet
för besvärliga
vårtor !

Best.nr	Benämning	Pris/fp
cryoa8b	Cryoalfa - DERM S + 1 gaspatron, 8 gram	1.385:-
cryoa7b	Cryoalfa - SK + 1 gaspatron, 16 gram	1.385:-
Cryoa6	CryoAlfa - LUX + 1 gaspatron, 16 gram	4.520:-

Tillbehör

cryoref16	Gasbehållare 16 gram, lustgas (PERFECT, PRO)	470:-/st
cryoref8lux	Gasbehållare 8 gram, lustgas, med inbyggd ventil (LUX, S, SK)	349:-/st
cryoref16lux	Gasbehållare 16 gram, lustgas, med inbyggd ventil (LUX, S, SK)	525:-/st
cryocerv5	Gynekologi - Cervix applikator 5 cm (LUX)	2.900:-
cryocerv9	Gynekologi - Cervix applikator 9 cm (LUX)	2.900:-
cryocerv13	Gynekologi - Cervix applikator 13 cm (LUX)	2.900:-
cryocervmix	Gynekologi - Applikatorer, 4 st olika längder (3, 5, 9 och 13 cm, utvändigt diameter 4.5 mm) (LUX)	8.760:-
cryodent	Dental applicators, böjd 45 grader, längd 10 cm.(LUX)	2.585:-
cryocont3	Kontaktfrysning - applikator diameter 3 mm (LUX)	3.595:-
cryocont5	Kontaktfrysning - applikator diameter 5 mm (LUX)	3.595:-
cryocont75	Kontaktfrysning - applikator diameter 7.5 mm (LUX)	3.820:-
cryocontmix	Kontaktfrysning - Applikatorer, 3 st olika diametrar (3, 5, 7.5) (LUX)	8.620:-

CryoAlfa LUX

CryoAlfa LUX har till skillnad från äldre modeller en inbyggd ventil i gaspatronen, vilket ger en minimal gasförlust. Produkten lämpar sig för alla typer av kliniker. Till LUX-modellen finns ett antal applikatorer (spetsar) som tillval. Beroende på hudförändringen och dess placering, byter du applikator efter behov. En applikator medföljer, ytterligare applikatorer finns som tillval t.ex för gynekologi, proktologi, dental samt kontaktfrysning.



CryoAlfa DERM S

CryoAlfa S har till skillnad från äldre modeller en inbyggd ventil i gaspatronen, vilket ger en minimal gasförlust. Produkten lämpar sig för enklare typ av kryobehandling av benigna hudförändringar typ hand-/fotvårter, molusker. Applikatorn kan inte bytas.



CryoAlfa SK

CryoAlfa SK har till skillnad från äldre modeller en inbyggd ventil i gaspatronen, vilket ger en minimal gasförlust. Produkten är avsedd för kontaktfrysning vilket gör den lämplig för kosmetiska benigna hudförändringar typ lentigo mfl. Applikatorn kan inte bytas.



Kontaktfrysning

Applikator för traditionell kontaktfrysning för LUX Finns i diametern 3, 5, 7,5 mm.



Dental

Böjd applikator 45° för smärtblockering för LUX.



Gynekologi

Exempel på gynekologi-applikator för modellerna LUX. Finns i 4 olika längder 3, 5, 9, 13 mm.



WALACH

Fryspistol LL50x/LL100 ger bästa precision

Wallach unika design med dubbla reglage ger användaren full kontroll över frysning såväl som avisning. Fryspistolens konstruktion ger bättre precision och dubbelt så hög fryseffekt jämfört med andra system vilket garanterar ett fullgott behandlingsresultat på kortare tid.

LL100 kontrollsystem reglerar det höga gasflödet innan det når frysspetsen.



Best.nr	Benämning	Pris/fp
LL100x	Fryspistol LL100x, inkl 3 st standardspetsar, temperatur -60°C	23.690:-
900001	Fryspistol LL100 för N ₂ O (lustgas), temperatur -60°C	19.590:-
900002	Fryspistol LL100 för CO ₂ , temperatur -40°C	19.590:-
900020	Fryspistol LL100 "kort skaft" för N ₂ O (lustgas), temperatur -60°C	23.800:-
900034	Fryspistol LL100 "kort skaft" för CO ₂ , temperatur -40°C	23.800:-

Tillbehör

900221AA	Platsskydd för frysspets, 100 st/fp	1.390:-
900690	Temperaturgivare oberoende (29 ga, 2 cm)	4.360:-
900698	Temperaturgivare oberoende (26 ga, 4 cm)	5.690:-
901015	Evakuerings slang, kopplas till LL100, när man avänder N ₂ O	560:-
901050	Bärväska i hårdplast för LL50x samt LL100	1.400:-

Alla priser exkl. moms och frakt.

Kampanjerbjudande !

Vid köp av fryspistol LL100x, bjuder vi på
3 st valfria frysspetsar utan kostnad

Detta erbjudandet är tidsbegränsat, när du beställer måste du ange kampanjkoden som du finner i medföljande brev.




Många fördelar med Wallach fryspistol

- Lätt och ergonomisk design. Fryspistolen LL50x / LL100's vikt och konstruktion gör den mycket smidig att använda samtidigt som den ger användaren bra visuell och fysisk kontakt med hudförändringar som skall behandlas.
- Inbyggda säkerhetsfunktioner. Enda tillfället som det finns gas i frysspetsen är när något av reglagen är intryckta. Frysspetsen kan bytas när som helst och alla delar i fryspistolen är isolerade för att skydda användaren samt patienten mot ofrivillig frysning.
- Brett användningsområde. Till fryspistolen LL50x / LL100 kan vi erbjuda marknadens bredaste sortiment av utbytbara frysspetsar. Nästan alla spetsar är autoklaverbara.
- Förvaring. Enkel och översiktlig förvaring av pistol och frysspetsar när de inte användes.
- 5 års garanti mot fabriktionsfel

Engångsskydd av plast

Plastskyddet bytes efter varje behandling. De fungerar som en isolator och förhindrar att vävnadsrester fastnar på frysspetsen på grund av ofrivillig fryskontakt. Plastskyddet är också en del av kopplingen mot fryspistolen och behövs för att garantera rätt anslutning.

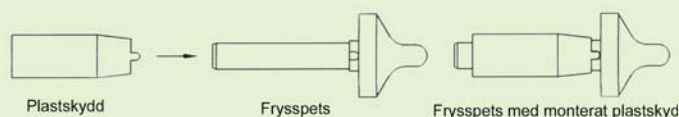

Enkel rengöring;

- Ta bort plastskyddet från frysspetsen och släng
- Plugga frysspetsen för rengöring
- Rengör frysspetsen från blod och andra partiklar
- Skölj med vatten
- Sterilisera frysspetsen i autoklav eller EtO
- Följ autoklavtillverkarens instruktioner för denna typ av material
- Montera ett nytt plastskydd
- Frysspetsen är nu färdig att användas

WALLACH

WA1000B

för avancerad kryokirurgi

Konsollsystemet är skapat för att ge användaren en kombination av enkelt handhavande med hög säkerhet. WA1000B använder den kraftfulla fryspistolen LL100 som med sina dubbla reglage ger användaren ökad precision och hög effekt. Avläsning av gastrycket underlättas dessutom genom att tryckmätaren är färgkodad.

Systemet har en borttagbar rostfri behållare/hållare för att placera fryspistolen i. Kan även användas vid kemisk desinfektion.

- Omedelbar och exakt avläsning av temperatur i frysspets och vävnad när man använder fryspistol med inbyggd temperaturgivare. Genom att ändra läge på omkopplaren kan man se frysdjup genom att använda en oberoende hypodermatisk temperaturgivare.
- En timer med ljudsignal startar automatiskt när frystemperatur är uppnådd, indikerar sedan den faktiska frystiden vid rätt uppnådd temperatur.
- Elegant och attraktiv design på rullvagn skapar professionell atmosfär i behandlingsrummet.
- Vagnen har utrymme för 1 till 2 stycken gasbehållare.
- Kompakt och lättmanövrerad med stora hjul gör vagnen lätt att förflytta över trösklar och andra ojämnheter.
- 1 års garanti mot fabriktionsfel.

Lämplig
för dig som
arbetar med

- Gynekologi/Obstetrik
- Ögonkirurgi
- Hjärtkirurgi
- Smärtblockering
- Dermatologi



Best.nr	Benämning	Pris/tp
900506-1	WA1000B-1 Konsoll, Bas, Fryspistol LL100	37.850:-
900506-2	WA1000B-2 Konsoll, Bas, Fryspistol LL100, Timer, Digital termomter	48.650:-
905516-1	WA1000AB Kombi - Ögonkirurgi Konsoll, Bas, Fryspistol LL100, Timer, Digital termomter, Proben för Ophthalmic (Ögonkirurgi) är tillval	60.500:-

Alla priser exkl. moms och frakt.

WALACH

Frysspetsar med engångsskydd av plast

Wallach erbjuder marknads bredaste urval av frysspetsar. Samtliga passar den populära fryspistolen LL50x och LL100. Frysspetsarna är utformade för att möta såväl säkerhetskrav som enkelt handhavande. Plastskyddet tas bort från frysspetsen efter varje behandling och slänges. Tack vare denna konstruktion kan den resterande delen av frysspetsen steriliseras genom autoklavering eller EtO. Plastskyddet fungerar också som isolation.



2.5 mm HPV spets (T-0200)
Best.nr. 900300AA

3.350:-



ExoCervial spets (T-1905)
Best.nr. 900209AA

3.350:-



Svängd rektal spets (T-0832)
Best.nr. 900217AA

3.350:-



5.0 mm HPV spets (T-0500)
Best.nr. 900301AA

3.050:-



Exo-EndoCervial spets (T-1910)
Best.nr. 900211AA

3.350:-



Anorektal spets (T-0337)
Best.nr. 900218, kan ej steriliseras

3.350:-



7.0 mm HPV spets (T-0700)
Best.nr. 900302AA

3.350:-



Lång Exo-EndoCervial spets (T-1920)
Best.nr. 900212AA

3.350:-



Anorektal spets (T-0337)
Best.nr. 900220, kan ej steriliseras

4.300:-



9.0 mm HPV spets (T-0900)
Best.nr. 900303AA

3.350:-



Exo-EndoCervial spets (T-1920)
Best.nr. 900210AA

3.350:-



Snedskuren spets (T-0524)
Best.nr. 900202AA

3.350:-



11.7 mm HPV spets (T-1200)
Best.nr. 900304AA

3.350:-



ExoCervial spets (T-2507)
Best.nr. 900214AA

3.350:-



Snedskuren spets (T-0823)
Best.nr. 900207AA

3.350:-



13.5 mm HPV spets (T-1300)
Best.nr. 900305AA

3.350:-



Exo-EndoCervial spets (T-2514)
Best.nr. 900215AA

3.350:-



Konisk spets (T-0219)
Best.nr. 900201AA

3.350:-



15.0 mm HPV spets (T-1500)
Best.nr. 900306AA

3.350:-



Kondylom spets (T-0519)
Best.nr. 900203AA

3.350:-



Mikroderm spets (T-0219)
Best.nr. 900200AA

3.350:-



19.0 mm platt spets (T-1900)
Best.nr. 900308AA

3.350:-



Allmän spets (T-0819)
Best.nr. 900205AA

3.350:-



Konisk spets (T-0826)
Best.nr. 900206AA

3.350:-



25.0 mm platt spets (T-2500)
Best.nr. 900213AA

3.350:-



Rektal spets (T-0832)
Best.nr. 900204AA

3.350:-

WALLACH

Ultra Freeze - Portabel kryokirurgi med flytande kväve

Den lätta vikten och ergonomiska konstruktionen gör den idealisk för behandling av de flesta hudförändringar. Enkelt att byta munstycke via luer- lock koppling.

- Finns i 2 storlekar 0.3 och 0.5 liter.
- Ergonomiskt utformat grepp.
- Handtag justerbart för höger eller vänsterhänta personer.
- Ny teknik för jämt flöde och fördelning.
- Hög effekt och kapacitet.
- Flaska i borstad aluminium, fot i delrin plast för bättre stabilitet.
- Ny design på sprutmunstycke ger bättre noggrannhet och precision.
- 3 års garanti mot fabrikationsfel

Ultra Freeze ställ och stängda frysprober är tillval



Kampanjerbjudande !

Vid köp av Ultra Freeze så bjuder vi på en AccuShield utan kostnad



Detta erbjudandet är tidsbegränsat, när du beställer måste du ange kampanjkoden som du finner i medföljande brev.

AccuShield



Plastbricka med 6 koniska öppningar ger användaren möjlighet att styra behandlingen till ett begränsat område.

Best.nr	Benämning	Pris/fp
900076	UltraFreeze 0.5 liter Sprayflaska inkl. 4 st spraymunstycken	8.530:-
900076	UltraFreeze 0.3 liter Sprayflaska inkl. 4 st spraymunstycken	8.530:-

Tillbehör

900080	Adapter för Brymill spray munstycken	570:-
900108	ACCU-SHIELD plastbricka med 6 koner	630:-
900112	Ställ, enligt bild ovan	930:-
900090	Frysspets 2 mm, platt, stängd öppning	1.250:-
900091	Frysspets 3 mm, platt, stängd öppning	1.250:-
900092	Frysspets 5 mm, platt, stängd öppning	1.250:-
900093	Frysspets 6 mm, platt, stängd öppning	1.250:-

Alla priser exkl. moms och frakt.



Öka din försäljning i samband behandling

I nära samarbete med Scholl, kan vi nu erbjuda hela deras sortiment för fotvård och friskvård.

Vårtplåster och avlastningsdynor är speciellt intressanta för Er som utför behandlingar med kryokirurgi, kliniska studier på Histofreezer visar att man kan förbättra behandlingsresultatet med över 40%. Vår rekommendation är därför att inte skicka patienten till Apoteket för att köpa vårtmedel, utan att erbjuda produkterna självt som god service.



Vårtplåster för Fot & Hand

Innehåller plåster med Salicylsyra som effektivt och smärtfritt underlättar vid behandling av fotvårtor, samtidigt som den omgivande friska huden skyddas. Det vattenfasta och extra tunna tryckskyddplåstret ger omedelbart skydd och smärtlindring. Scholl vårtplåster i kombination med traditionell kryokirurgi (Histofreezer), ger en 40%-ig förbättring av behandlingsresultat, enligt utförda kliniska studier.

Ingredienser: Salicylsyra EP 40%, polyvinyl alkyl eter lim, Titaniumdioxid, flytande parafin, Thiophenol Antioxidant, järnoxid

Innehåller: 15 plåster, 15 plåster med salicylsyra,

Best.nr: 10004091

Trp fp: 6 st/fp (minsta beställnings storlek)



Avlastning vårt/liktorn efter behandling

Självhäftande dynor lindrar omedelbart tryck och skav efter kryokirurgi. Dubbla lager skumgummi ger optimal avlastning och extra mjukt skydd mot friktion. Den speciella formen gör att det kan användas på alla ställen på tårna. Lämplig även för känslig hud.

Innehåller: 9 tryckskydd

Best.nr: 10004076

Trp fp: 12 st/fp (minsta beställnings storlek)



Fresh Step Compact Deo Fotspray

Antiperspirant fotspray i koncentrerad form som räcker länge. Absorberas snabbt och verkar omedelbart. Håller fötterna torra, luktfria och fräscha i 24 timmar. Liten diskret flaska som är lätt att ta med i väskan eller fickan. Spraya direkt på fötterna när det behövs, ingen alkohol.

Ingredienser: Vatten, Aluminium, Sesquiklorhydrat, Coco-Caprylate/Caprate, Dicaprylul eter, Glyceryl Stearate, Cyclopentasiloxane, Ceteareth-20, Parfym, Ceteareth-12, Cetearyl, Alkohol, CetylPalmitate, Benzyl Salicylate, Butylphenyl, Methylpropional, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene Linalool

Innehåller: 25 ml

Best.nr: 10007831

Trp fp: 6 st/fp (minsta beställnings storlek)

Best.nr	Benämning	Pris / st
10004091	Vårtplåster för hand & Fot, 15 plåster	26:-
10004076	Avlastning vårt/liktorn efter behandling, 12 avlastningar	23:-
10007831	Fresh Step Compact Fotspray, 25 ml	23:-

Alla priser exkl. moms och frakt

B

Sverige



Diskmedel



För att erhålla optimal rengöringseffekt i ett ultraljudsbad krävs rätt diskteknik i kombination med lämpligt rengöringsmedel.

Best.nr.	Benämning	Volym Liter	Pris
980	Stammpur DR, blötläggning	1	250:-
944	Stammpur DR, blötläggning	2	410:-
981	Stammpur DR, blötläggning	5	845:-
972	Stammpur DR8, skonsam rengöring	2	830:-
974	Stammpur DR8, skonsam rengöring	5	1.925:-
988	Stammpur R, standardrengöring	1	245:-
934	Stammpur R, standardrengöring	2	345:-
989	Stammpur R, standardrengöring	5	830:-
968	Stammpur GR, kraftig rengöring	1	300:-
938	Stammpur GR, kraftig rengöring	2	500:-
969	Stammpur GR, kraftig rengöring	5	830:-

BANDELIN

Ultraljudsbad

Sonorex Digitec är en NY serie kompakta ultraljudsbad som är mycket enkla att använda. Som extra säkerhet stänger DIGITEC automatiskt av sig 12 timmar efter sista knapptryckningen.



Modell	Volym Liter	Innermått b x d x h (mm)	Ytermått b x d x h (mm)	HF max W	Pris
DT 31	0.9	190 x 85 x 60	250 x 100 x 170	240	4.050:-
DT 100	3.0	240 x 140 x 100	260 x 160 x 250	320	6.570:-

Samtliga priser är exklusive moms, frakt tillkommer. De ordinarie priserna gäller under 2009, med reservation för slutförsäljning och valutaförändringar eller prishöjningar från leverantör.

Kampanjer är tidsbegränsade, när du beställer måste du ange kampanjkod som du finner i medföljande brev.



SKAFTE MedLab AB
Apelrödsvägen 1
SE-439 32 Onsala
Sverige

Telefon: 0300-56 94 94
Telefax: 0300-56 94 99
E-post: info@skafte.se
Hemsida: www.skafte.se